

La seringue double légère ultra 2810

La seringue double ultra 2810 est 40% plus légère, nécessite 30% moins de force et présente une course 20% plus courte*. Son confort et sa facilité d'utilisation quelle que soit la taille de la main s'apprécient lors de l'injection sur des animaux de petite ou moyenne taille.

- Pour l'administration simultanée de deux liquides distincts
- Précision inégalée dans l'injection de microvolumes
- Volume réglable indépendamment
- Corps de seringue robuste et léger en résine renforcée de fibre de verre

*comparée à la version classic



2810

0.1 - 0.5 ml

0.1 - 1 ml

0.3 - 2 ml

28 mm

Limiter les blessures cutanées

Compatible avec le manifold en acier inox pour injecter deux liquides différents avec une seule aiguille. Il permet de limiter les points d'injection et les blessures sur l'animal. Il s'adapte facilement sur les raccords Luer Lock, sans outil.

No. Cat. 1.287.685

Démontage et entretien

La seringue est facile à démonter et remonter. Accès aisé à tous les éléments pour un nettoyage rapide et efficace. Durabilité garantie, toutes les pièces de rechange sont disponibles.



Les modèles de seringues ultra 2810

Alimentation flacon 2810.1



Alimentation tuyau 2810.2



Performances et commande

Éléments inclus: seringue avec embouts Luer Lock, kit de pièces de rechange pour chaque soupape, guide rapide et selon le modèle: kit porte-flacon ou kit tuyau.



Volume (ml)	Division (ml)	Précision (CV%)			No. Cat.	
		Vol. min.	Vol. inter.	Vol. max.	Modèle porte-flacon	Modèle tuyau
0.1 - 0.5	0.05	< 1.2%	< 0.8%	< 0.4%	2810.1.05005	2810.2.05005
0.1 - 1	0.05	< 0.7%	< 0.6%	< 0.4%	2810.1.0501	2810.2.0501
0.3 - 2	0.1	< 0.6%	< 0.5%	< 0.4%	2810.1.0502	2810.2.0502